

- Doppia lama tagliente
- Punta arrotondata
- Tecnologia XP – Da non affilare!




Meno Strumenti Necessari



AMERICAN EAGLE INSTRUMENTS® INC
better DENTISTRY by DESIGN™

DG DOUBLE
GRACEY^{xp}
The Next Generation

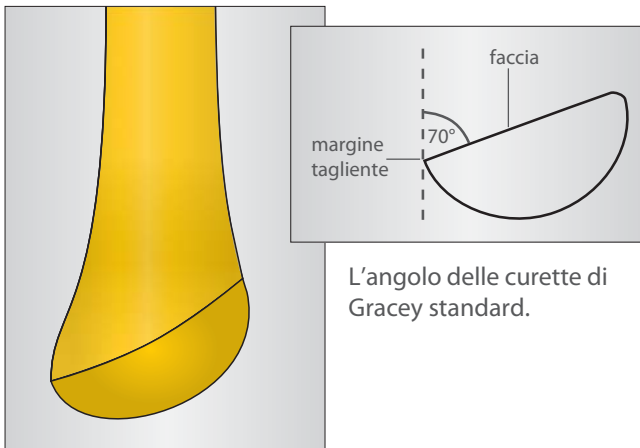



Le curette di Gracey

Le curette di Gracey Standard hanno una faccia angolata mediamente a 70° rispetto al gambo terminale (V. figura a sinistra). L'estremità lavorante (la lama) è arrotondata. Variazioni con gambi più lunghi e lame più corte sono utilizzate per le procedure nelle tasche più profonde e più strette o per l'uso nelle forcazioni. Le curette di Gracey sono sito-specifiche. L'operatore ha bisogno di un numero minimo di strumenti per ottimizzare l'efficacia del sistema.

1 + 1 = 1

Double Gracey™ – L'Ultima Innovazione

La gamma Double Gracey è l'ultima innovazione American Eagle Instruments. Due strumenti combinati in uno. Questo consente all'operatore di seguire la tecnica Gracey, ma con l'economia di usare curette universali.

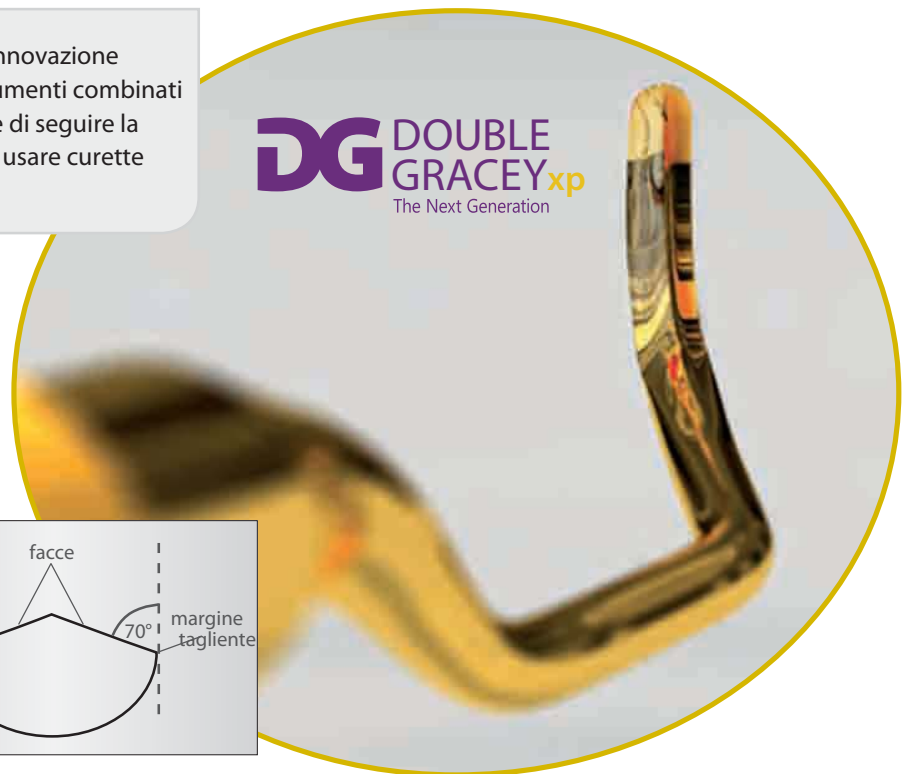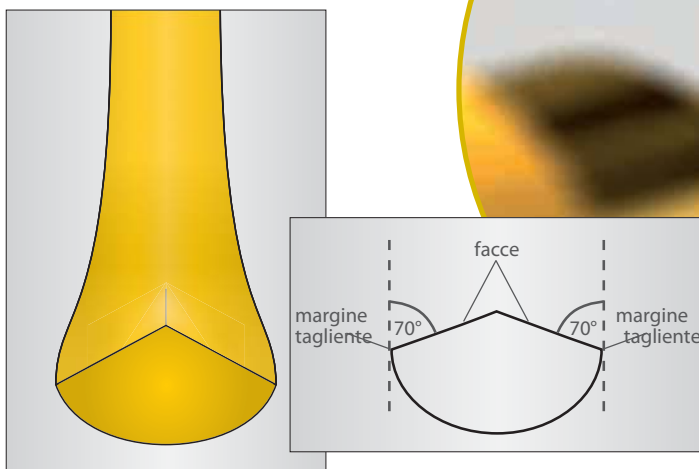


Double Gracey™ e Tecnologia-XP – Il Team supremo!

Lo sviluppo della gamma Double Gracey è stato possibile solo grazie alla Tecnologia XP. La configurazione di uno strumento Double Gracey è molto complicata. Sono realizzati per NON dover essere affilati.

Tutti gli strumenti con tecnologia XP mantengono le loro lame così a lungo che la necessità di affilatura è stata eliminata. Dopo un lungo utilizzo, gli strumenti sono sostituiti SENZA AFFILATURA.

BASTA AFFILATURA!

La tecnologia XP è un processo brevettato di ingegneria delle superfici. La superficie dello strumento è indurita metallurgicamente. Questo permette la realizzazione di strumenti più sottili, con lame più affilate. L'impopolare procedura di affilatura è eliminata.

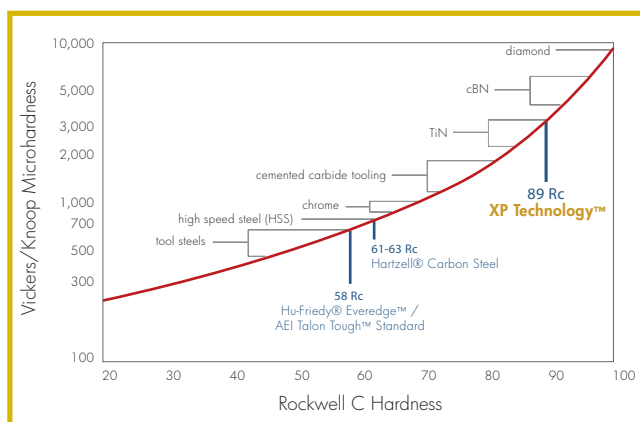

1.500 colpi



15.000 colpi

Independent tests performed at the University of Toronto, Dr. Phillip A. Watson, Dept. of Biological and Diagnostic Sciences.

Durezza Rockwell – 89 Rc

La tecnologia XP è l'integrazione di una lega superdura nella lega di acciaio inox della superficie. La superficie diventa più dura e durevole. Gli strumenti standard sono realizzati in acciaio inossidabile o al carbonio e raggiungono un grado di durezza tra 58 e 63 sulla scala Rockwell. Con la tecnologia XP si raggiunge un valore di durezza di 89!


Gli strumenti XP perciò dureranno molto più a lungo.

15,000 Colpi – 100 Volte di minor usura

Studi indipendenti hanno mostrato come la tecnologia XP sia un progresso tecnologico rivoluzionario nell'industria dentale. Il Dr. Phillip A. Watson dell'Università di Toronto è stato in grado di provare la fenomenale durabilità degli strumenti trattati con la tecnologia XP rispetto agli stessi strumenti realizzati con il miglior acciaio inossidabile disponibile.

Le Gracey Classiche

Le curette di Gracey sono realizzate per adattarsi ad aree anatomiche specifiche dei denti per lo scaling sub-gengivale e per il root planing. L'angolo della lama consente un'inserzione più facile nel solco minimizzando i traumi per i tessuti molli.

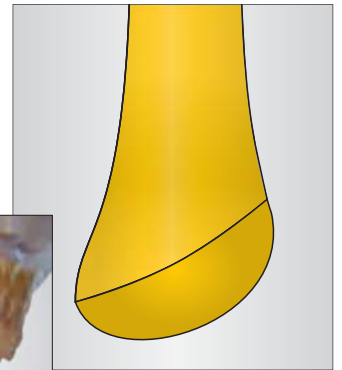


Double Gracey™ Regular



Double Gracey per Anteriori


Sostituisce le Gracey 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 e 9-10.

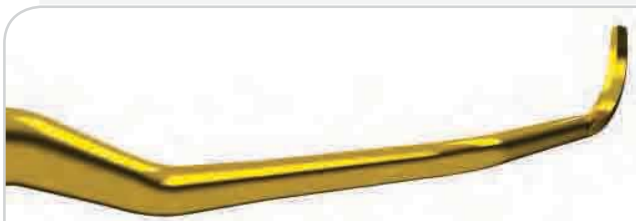

Double Gracey per Posteriori

Sostituisce le Gracey 11-12, 13-14, 15-16.




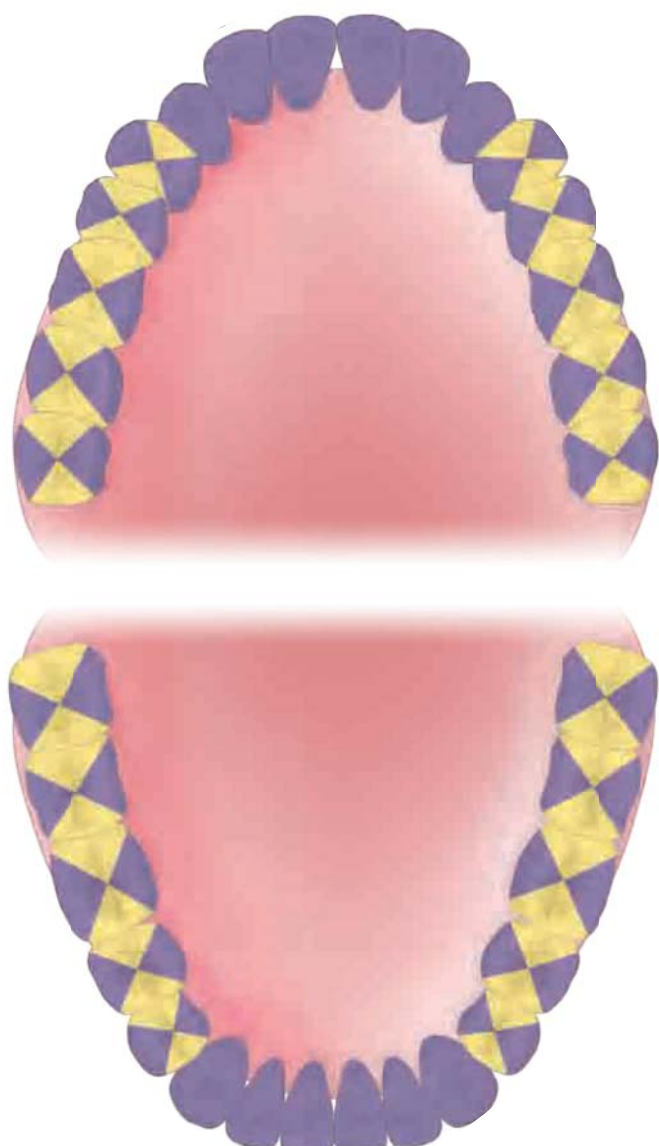

Lo schema della bocca mostra le aree di impiego degli strumenti Double Gracey Regular. Due strumenti sostituiscono l'intera gamma delle curette di Gracey standard.

- Double Gracey per Anteriori
- Double Gracey per Posteriori




In confronto a questo si può vedere qui sotto lo schema della bocca con gli strumenti Gracey "regolari".

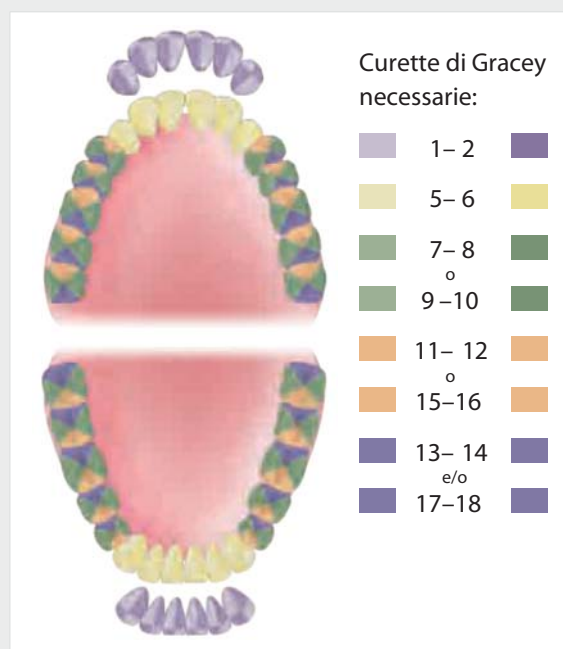

Immagini di casi clinici: Dr. Klaus-Dieter Hellwege, Lauterecken, Germany.

Double Gracey™ Mini – Per le tasche più profonde

Con la lama lunga la metà e il gambo 3mm più lungo rispetto a quello di una Double Gracey regular, l'intera lama è posizionata facilmente sulla superficie della radice. Anche le tasche più strette e le forcazioni sono facilmente accessibili.

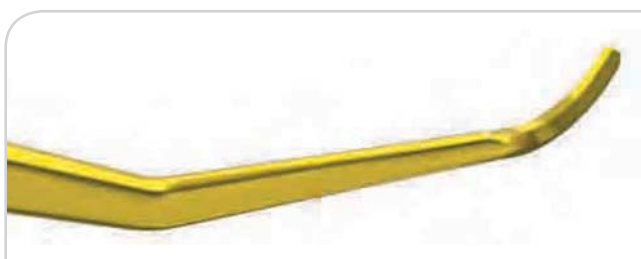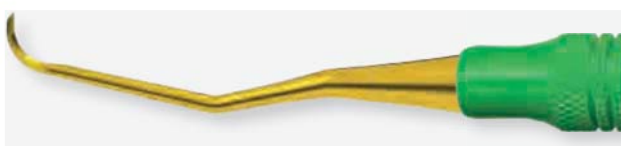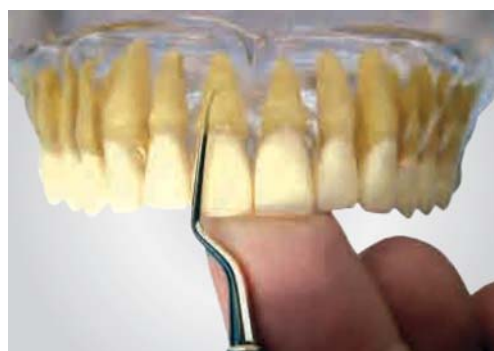


Double Gracey Mini Anterior

Sostituisce le Gracey Access (Mini-Five™) 00-0, 1-2, 3-4, 5-6 e 7-8.



Double Gracey Mini Posterior

Sostituisce le Gracey Access (Mini-Five™) 11-12, 13-14, 15-16.

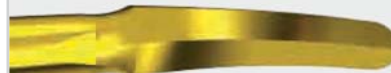


TESTIMONIAL Liisa Mellanen, Finland

With Double Gracey ...

- in futuro avrò 2 curette invece di 4 nel mio tray
- risparmierò più del 30% del mio tempo di lavoro
- è molto facile abituarsi alla nuova tecnica, ci vogliono meno di 10 trattamenti

* Mini Five™ è un marchio registrato di Hu-Friedy

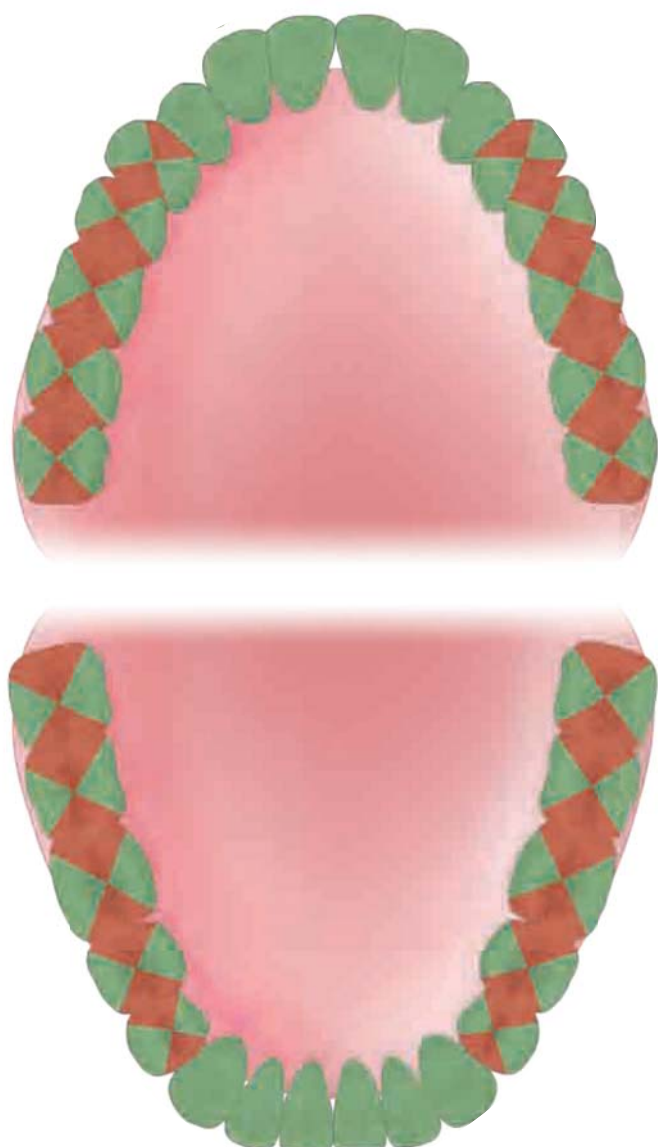

Lo schema della bocca mostra le aree di impiego degli strumenti Double Gracey Mini. Due strumenti sostituiscono l'intera gamma delle curette Gracey Access (Mini Five™).

- Double Gracey Mini per Anteriori
- Double Gracey Mini per Posteriori

TESTIMONIAL Juliette Reeves, Regno Unito

- Uso le Double Gracey per il root-planing, specialmente nella fase iniziale della terapia
- ci vogliono meno colpi per lisciare la superficie della radice
- 2 strumenti invece che 4
- serve molta meno pressione
- facile abituarsi all'uso
- notevole risparmio di tempo

Penso che siano una grande aggiunta al mio kit perio.



Anteriori



Posteriori mesiali



Posteriori distali

Immagini di casi clinici: Professor Moshe Goldstein, Hadassah University, Israel.

Double Gracey Kits

KIT
DOUBLE
GRACEY
Ref.:
AEDGKXPX



KIT
DOUBLE
GRACEY
MINI
Ref.:
AEDGMKXPX



Double Gracey	sostituisce...	Indicazioni
per Anteriori	Gracey 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 e le curette Universali	Anteriori / Linguali - Buccali
per Posteriori	Gracey 11-12, 13-14, 15-16 e le curette Universali	Mesiali - Distali
Mini per Anteriori	Mini Five™ / Gracey Access 00-0, 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 e le curette Universali	Anteriori / Linguali - Buccali
Mini per Posteriori	Mini Five™ / Gracey Access 11-12, 13-14, 15-16 e le curette Universali	Mesiali - Distali

Mini Five™ è un marchio registrato di Hu-Friedy



MaxiMedical

Via B. Zumbini 38
20143 Milano
tel. 02.89.12.48.38
fax 02.89.12.49.70
www.maximedical.it



AMERICAN EAGLE INSTRUMENTS® INC
Better DENTISTRY by DESIGN™