

Endo-Express™



SAFE SIDER®

CARATTERISTICHE

Il sistema Endo-Express

VANTAGGI

Permette di preparare i canali in 2-5 minuti dalla misurazione, senza affaticare la mano.

Gli strumenti vengono sostituiti perché consumati, non per la paura che si possano rompere!

Movimento alternato

Il moto alternato crea una forza bilanciata, lo strumento rimane centrato.

Il moto a 45 gradi praticamente elimina:

- l'affaticamento ciclico
- gli stress da torsione
- il grippaggio
- che a sua volta elimina il rischio di rottura.

Si ottiene una conicità .08 in modo sicuro ed efficace.

Reamers in rilievo con meno scanalature

I SafeSiders hanno 16 scanalature rispetto alle 24 dei files. Meno scanalature comportano meno bloccaggi nelle pareti del canale, minor resistenza, nessun grippaggio e nessuna rottura.

Il lato piatto dei SafeSiders

Agisce come uno scalpello nel movimento in senso orario ed antiorario consentendo di entrare nel dente e rimuovere i detriti in maniera inaspettatamente semplice.

Tecnica di strumentazione semplice

Facile da apprendere.

Economico

Evita la distorsione del canale.

Ogni singolo utilizzo costa circa il 90% in meno rispetto ai NiTi meccanici.

I SafeSiders sono utilizzati in sicurezza almeno 3 volte di più rispetto agli strumenti NiTi prima di essere sostituiti, così i costi sono enormemente ridotti.

Dal momento che il rischio di rottura dello strumento è praticamente assente, si ha una maggior confidenza e si trattano anche i casi più sfidanti. Grazie al moto alternato del motore, il tempo di lavoro alla poltrona è ridotto di molto con conseguente aumento della produttività.



Evitate l'ansia da rottura!

Il Sistema SafeSiders® consiste di una serie di strumenti brevettati non circolari, con una superficie piatta ininterrotta, realizzati per ridurre gli stress endodontici. Un livello di performance superiori e predicibili, senza paura di rompere lo strumento, che elimina gli stress del sistema sia per il dentista che per il paziente.

Le testimonianze di chi ha già utilizzato il sistema, esaltano il binomio Endo-Express SafeSider per l'efficacia, per i risultati ottenuti, per la sicurezza e per il costo; l'endodonzia e l'uso dei reamers risultano davvero più facili.

SafeSiders & Endo-Express


Il **Sistema Endo-Express™ con i SafeSiders®** elimina la paura di fratture propria dei sistemi crown-down ed i tipici inconvenienti delle procedure a step-back.

I **SafeSiders®** sono i soli strumenti con una superficie piatta brevettata su tutta la parte lavorante. Questa superficie:

- Riduce il bloccaggio degli strumenti, permettendo un avanzamento più rapido ed una minor resistenza.
- Crea spazio per i detriti dentinali che altrimenti ostruirebbero le spire dei files e reamers convenzionali.
- Riduce gli stress da compressione e da tensione durante l'uso, consentendo una maggior durata dello strumento.
- Aumenta la flessibilità senza sacrificarne la forza.
- Elimina le preoccupazioni da rottura.

A differenza dei reamers/files che potenzialmente possono bloccare i canali e spingere i detriti oltre l'apice, il sistema a moto alternato **Endo-Express™** a 45 gradi elimina tali inconvenienti. Si evita anche il grippaggio, la dentina è innestata solo durante il movimento in senso orario. Il movimento in senso antiorario la disinnesta.

Durante l'uso con moto alternato, i frustoli si accumulano nello spazio lasciato dalla superficie piatta

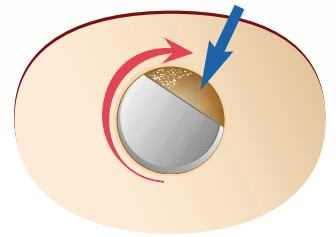

Vista del taglio dall'alto



Endo-Express E-Type, motore ad aria a 4 vie

Manipolo a moto alterato Endo-Express

PER ORDINI:

Kit Endo-Express™:

Endo-Express™ System con motore (lunghezza 21mm)	E-Type, motore ad aria a 4 vie, manipolo a moto alternato Endo-Express, Intro Kit SafeSider lungh. 21mm, 4 refills (1 ciascuno) .08, 10, 15, 20	Codice 5610-21
Endo-Express™ System con motore (lunghezza 25mm)	E-Type, motore ad aria a 4 vie, manipolo a moto alternato Endo-Express, Intro Kit SafeSider lungh. 25mm, 4 refills (1 ciascuno) .08, 10, 15, 20	Codice 5610-25
Endo-Express™ System (lunghezza 21mm)	Manipolo a moto alternato Endo-Express, Intro Kit SafeSider lungh. 21mm, 4 refills (1 ciascuno) .08, 10, 15, 20	Codice 5600-21
Endo-Express™ System (lunghezza 25mm)	Manipolo a moto alternato Endo-Express, Intro Kit SafeSider lungh. 25mm, 4 refills (1 ciascuno) .08, 10, 15, 20	Codice 5600-25
Manipolo Endo-Express™	Manipolo a moto alternato Endo-Express	Codice 5500-00
Motore ad aria Endo-Express™	Motore ad aria a 4 vie E-Type	Codice 5510-00

Intro Kit SafeSider®:

Ogni Intro Kit **SafeSider®** contiene:

Acciaio inox: due - 08, due - 10, due - 15, due - 20, due - 25, due - 30, due - 35, due - 40.

Nichel-titanio: due - 30/.04, due - 25/.08 - due reamers Peeso N° 2, un tray endodontico per sterilizzazione

Intro Kit reamer 21mm codice 5021-00

Intro Kit reamer 25mm codice 5025-00

Per la linea completa di tutti i prodotti brevettati EDS visitate il sito web: www.edsdental.com



Via B. Zumbini 38 • 20143 Milano • tel. 02.89.12.48.38 • fax 02.89.12.49.70 • maximedical@bec.it