

Eliminate l'affilatura con le uniche curette e scaler veramente da non affilare!

XP™ Technology



THE DENTAL ADVISOR
++++

- **Durano mesi senza dover essere affilate**
- **Il taglio più affilato che sia mai stato creato, realizzato a macchina**
- **Profilo della lama più sottile**
- **Procedure più rapide e più facili**
- **Più comfort, meno fatica**
- **Risparmio di tempo e denaro**



American Eagle Instruments® Inc.

Una rivoluzione nella realizzazione dello strumento

Durano per mesi senza dover essere affilate:

Le curette di Gracey XP sono realizzate per durare mesi senza la necessità di dover essere riaffilate.

Il taglio più affilato che sia mai stato creato, realizzato a macchina

Le esclusive caratteristiche della tecnologia XP permettono di realizzare un **filo affilato come un rasoio, che parte affilato e rimane affilato**, più a lungo di qualsiasi altra curette disponibile sul mercato.



Tecnologia XP - dopo 15.000 utilizzi




Lama non ricoperta - dopo 1.500 utilizzi

tests indipendenti realizzati all'Università di Toronto dal Dr. Phillip A. Watson Dept. Of Biological and Diagnostic Sciences

Profilo della lama più sottile:

Dal momento che le lame delle curette XP durano così a lungo, senza la necessità di dover essere riaffilate, sono state realizzate per essere **le lame più sottili nel mercato**. Questo consente un accesso più facile nelle tasche parodontali e nelle aree interprossimali per un miglior comfort per il paziente.

Il margine opposto arrotondato riduce i traumi tissutali.

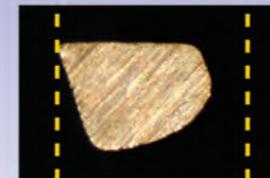

Curette XP



Curette Standard

Più comfort e meno fatica:

Uno strumento che è **sempre super affilato** dà una **maggior sensibilità tattile, richiedendo anche una presa molto più leggera**. È necessaria solo una lieve pressione per "spianare" calcoli e tartaro.

Risparmio di tempo e denaro:

Quando utilizzata correttamente, una curette XP durerà di più di qualsiasi curette standard, consentendo un risparmio di denaro ed eliminando la necessità di doverla affilare. Il tempo risparmiato potrà essere usato più proficuamente.

Sarete Voi i giudici

Sappiamo cosa state pensando. Sembra troppo bello per essere vero, **uno strumento che mantiene per mesi una super affilatura realizzata a macchina, consente procedure più facili e veloci, è più sottile, più economico e più comodo**.

Queste sono tutte affermazioni piuttosto grosse! E siamo d'accordo, sono davvero affermazioni grosse, ma non c'è mai stata una curette come la nostra nuova XP. Sosterremo queste affermazioni con la nostra garanzia incondizionata.

Vi invitiamo ad essere i giudici. **Senza rischi!** Provate le nostre curette XP. Se non sarete completamente soddisfatti, Vi restituiranno i soldi spesi o sostituiranno gli strumenti, senza fare domande. È una vostra scelta!

Quindi posate la vostra pietra per l'affilatura, prendete il telefono e chiamate oggi stesso Maxi Medical per fare il vostro ordine. Se desiderate ulteriori informazioni visitate il nostro sito www.maximedical.it.

Domande più frequenti:

- Che cosa rende le nuove curette differenti da quelle standard in acciaio inox?**
Le curette XP sono trattate con un procedimento brevettato che indurisce l'acciaio inox, e quindi lo riveste di uno strato simile al diamante. Ciò permette di realizzare un taglio che durerà per mesi senza avere bisogno di affilatura. I test sull'uso hanno dimostrato che la tecnologia XP sopporta 10 volte gli utilizzi con solo 1/10 di usura.
- Perché le curette XP sono più sottili di quelle standard?**
Molti dentisti ed igieniste hanno fatto richiesta di strumenti più sottili che permettano cure subgingivali migliori. La nuova tecnologia XP assicura già un taglio super affilato con una durata prolungata. Non c'è necessità di rendere più spessa la lama per compensare il materiale rimosso dall'affilatura.
- Come si sterilizzano e come si mantengono le nuove curette?**
Le curette XP possono essere pulite e sterilizzate come qualsiasi altra curette in acciaio inox.
- È necessario seguire particolari accorgimenti quando si usano le curette XP per consentirne la massima durata?**
Sì, le curette XP sono realizzate per uno scaling sottogengivale ed un root planing (levigatura delle radici) leggero. Bisognerebbe evitare di utilizzarle per rifinire i margini o per rimuovere grossi depositi di calcoli. Grazie alla nuova tecnologia XP si è eliminata la necessità di dovere applicare troppa pressione. Si userà quindi meno forza, ed anche un'impugnatura più leggera.
- È necessaria una cura particolare durante la pulizia e la sterilizzazione?**
American Eagle suggerisce l'uso di apposite cassette per la sterilizzazione e di appositi liquidi pulenti per ultrasuoni. Questo proteggerà gli strumenti da danni indesiderati causati dalle lame degli strumenti stessi che vengono a contatto l'una contro l'altra durante la pulizia in ultrasuoni.
- Le curette sembrano più affilate rispetto alla norma, perché?**
Sono più affilate! Le curette XP hanno un taglio più affilato e liscio realizzato per un root planing più efficace. Questo è il motivo per il quale si deve fare attenzione a non rifinire i margini e a non cercare di rimuovere grossi calcoli.
- È necessario cambiare la tecnica di scaling o root planing?**
No, lo strumento XP avrà solo bisogno di un planing (levigatura) più leggero. Si farà uso di meno forza, e con un'impugnatura più leggera.
- Le curette XP consentono davvero di avere una migliore sensibilità tattile?**
Sì, dal momento che la lama è così affilata e dura così a lungo si noterà come lo strumento possa realmente essere tenuto più leggermente durante le operazioni di scaling o di levigatura delle radici.
- Posso affilare le curette XP?**
Per lo spessore più sottile delle lame, si raccomanda di non affilare le curette XP. Quando saranno smussate dovranno semplicemente essere sostituite con uno strumento nuovo.
- Come posso risparmiare denaro usando le curette XP?**
Prima di tutto, si risparmia denaro per il semplice fatto di non dover affatto affilare gli strumenti. Quando il taglio originario di fabbrica risulta consumato se ne acquista uno nuovo. Il tempo e lo sforzo che si impiega nell'affilatura potrà essere impegnato con altri pazienti, o per altri scopi. Secondariamente, le curette XP dovrebbero durare di più rispetto alle curette tradizionali a seconda di come vengono utilizzate e trattate.
- Le curette XP possono anche consentire di lavorare più a lungo evitando l'insorgenza della sindrome del tunnel carpale?**
L'industria ha iniziato a riconoscere che un manico con un diametro più largo ed un peso più leggero ha molti più vantaggi. Le curette XP American Eagle hanno un manico più largo, un impugnatura più leggera e permettono di dover fare meno forza durante il loro utilizzo. La combinazione di tutti questi vantaggi dovrebbe ridurre il rischio dell'insorgenza di tale patologia.
- American Eagle garantisce la soddisfazione dell'utilizzatore con le curette XP?**
Assolutamente sì. Le curette XP garantiscono la soddisfazione dell'utilizzatore al 100%. Se per qualsiasi ragione non si sarà convinti che queste siano davvero le migliori curette mai utilizzate, saranno sostituite o rimborsate, a propria scelta.

XP™ SCALERS



XP™ CURETTES UNIVERSALI



XP™ GRACEY STANDARD, +3™ DEEP POCKET, +3™ ACCESS



H 6-7 XP
 AES H6-7XPX
 AES H6-7XPZC
 AE S H6-7XPZ
 Anteriore Universale

J4-U5 XP
 AES J4-U5XPX
 AES J4-U5XPZC
 AE S J4-U5XPZ
 Anteriore

Barnhart 1-2
 AE CB 1-2XPX
 AE CB 1-2XPZC
 AE CB 1-2XPZ

Barnhart 5-6
 AE CB 5-6XPX
 AE CB 5-6XPZC
 AE CB 5-6XPZ

Gracey 1-2
 AE G 1-2XPX
 AE G 1-2XPZC
 AE G 1-2XPZ

Gracey 3-4
 AE G 3-4XPX
 AE G 3-4XPZC
 AE G 3-4XPZ

Gracey Access 00-0
 AE GA 00-0XPX
 AE GA 00-0XPZC
 AE GA 00-0XPZ

Gracey Access 1-2
 AE GA 1-2XPX
 AE GA 1-2XPZC
 AE GA 1-2XPZ

204 S XP
 AES 204SXPX
 AES 204SXPZC
 AE S 204SXPZ
 Posteriore

J14-15 XP
 AES J14-15XPX
 AES J14-15XPZC
 AE S J14-15XPZ
 Posteriore

Columbia 13-14
 AE CC 13-14XPX
 AE CC 13-14XPZC
 AE CC 13-14XPZ

Columbia 2L-2R
 AE CC 2L-2RXPX
 AE CC 2L-2RXPZC
 AE CC 2L-2RXPZ

Gracey 5-6
 AE G 5-6XPX
 AE G 5-6XPZC
 AE G 5-6XPZ

Gracey 7-8
 AE G 7-8XPX
 AE G 7-8XPZC
 AE G 7-8XPZ

Gracey Access3-4
 AE GA 3-4XPX
 AE GA 3-4XPZC
 AE GA 3-4XPZ

Gracey Access 5-6
 AE GA 5-6XPX
 AE GA 5-6XPZC
 AE GA 5-6XPZ

204 SD XP
 AES 204SDXPX
 AES 204SDXPZC
 AE S 204SDXPZ
 Distale Posteriore

M23 XP
 AE S M23XPX
 AE S M23XPZC
 AE S M23XPZ
 Posteriore

Columbia 4L-4R
 AE CC 4L-4RXPX
 AE CC 4L-4RXPZC
 AE CC 4L-4RXPZ

Langer 1-2
 AE CL 1-2XPX
 AE CL 1-2XPZC
 AE CL 1-2XPZ

Gracey 9-10
 AE G 9-10XPX
 AE G 9-10XPZC
 AE G 9-10XPZ

Gracey 11-12
 AE G 11-12XPX
 AE G 11-12XPZC
 AE G 11-12XPZ

Gracey Access 7-8
 AE GA 7-8XPX
 AE GA 7-8XPZC
 AE GA 7-8XPZ

Gracey Access 11-12
 AE GA 11-12XPX
 AE GA 11-12XPZC
 AE GA 11-12XPZ

H 5-33 XP
 AES H5-33XPX
 AES H5-33XPZC
 AE S H5-33XPZ
 Anteriore

N1 XP
 AE S N1XPX
 AE S N1XPZC
 AE S N1XPZ
 Anteriore

Langer 3-4
 AE CL 3-4XPX
 AE CL 3-4XPZC
 AE CL 3-4XPZ

Langer 5-6
 AE CL 5-6XPX
 AE CL 5-6XPZC
 AE CL 5-6XPZ

Gracey 13-14
 AE G 13-14XPX
 AE G 13-14XPZC
 AE G 13-14XPZ

Gracey 15-16
 AE G 15-16XPX
 AE G 15-16XPZC
 AE G 15-16XPZ

Gracey Access 13-14
 AE GA 13-14XPX
 AE GA 13-14XPZC
 AE GA 13-14XPZ

Gracey Access 15-16
 AE GA 15-16XPX
 AE GA 15-16XPZC
 AE GA 15-16XPZ

N128 XP
 AES N128XPX
 AES N128XPZC
 AE S N128XPZ
 Anteriore

N2 XP
 AE S N2XPX
 AE S N2XPZC
 AE S N2XPZ
 Posteriore

McCall 13-14
 AE CM 13-14XPX
 AE CM 13-14XPZC
 AE CM 13-14XPZ

McCall 13-14S
 AE CM 13-14SXPX
 AE CM 13-14SXPZC
 AE CM 13-14SXPZ

Gracey 17-18
 AE G 17-18XPX
 AE G 17-18XPZC
 AE G 17-18XPZ

Gracey 12-13 Mesial-Distal
 AE G 12-13XPX
 AE G 12-13XPZC
 AE G 12-13XPZ

311-312 XP
 AES 311-312XPX
 AES 311-312XPZC
 AE S 311-312XPZ

N 137 XP
 AES N137XPX
 AES N137XPZC
 AE S N137XPZ
 Anteriore

McCall 17-18
 AE CM 17-18XPX
 AE CM 17-18XPZC
 AE CM 17-18XPZ

McCall 17-18S
 AE CM 17-18SXPX
 AE CM 17-18SXPZC
 AE CM 17-18SXPZ

Gracey 11-14 Mesial-Distal
 AE G 11-14XPX
 AE G 11-14XPZC
 AE G 11-14XPZ

Gracey Deep Pocket 1-2
 AE GDP 1-2XPX
 AE GDP 1-2XPZC
 AE GDP 1-2XPZ

N128 DE XP
 AES N128DEXPX
 AES N128DEXPZC
 AE S N128DEXPZ
 Anteriore

U15-30 XP
 AES U15-30XPX
 AES U15-30XPZC
 AE S U15-30XPZ
 Anteriore

Rules 3-4
 AE CR 3-4XPX
 AE CR 3-4XPZC
 AE CR 3-4XPZ

Younger Good 7-8
 AE C Y 7-8XPX
 AE C Y 7-8XPZC
 AE C Y 7-8XPZ

Gracey Deep Pocket 3-4
 AE GDP 3-4XPX
 AE GDP 3-4XPZC
 AE GDP 3-4XPZ

Gracey Deep Pocket 5-6
 AE GDP 5-6XPX
 AE GDP 5-6XPZC
 AE GDP 5-6XPZ

J3-U15 XP
 AES J3-U15XPX
 AES J3-U15XPZC
 AE S J3-U15XPZ
 Anteriore

U15-33 XP
 AES U15-33XPX
 AES U15-33XPZC
 AE S U15-33XPZ
 Anteriore

Gracey Deep Pocket 7-8
 AE GDP 7-8XPX
 AE GDP 7-8XPZC
 AE GDP 7-8XPZ

Gracey Deep Pocket 11-12
 AE GDP 11-12XPX
 AE GDP 11-12XPZC
 AE GDP 11-12XPZ

Gracey Deep Pocket 13-14
 AE GDP 13-14XPX
 AE GDP 13-14XPZC
 AE GDP 13-14XPZ

Gracey Deep Pocket 15-16
 AE GDP 15-16XPX
 AE GDP 15-16XPZC
 AE GDP 15-16XPZ

MANICI



Via B. Zumbini 38 • 20143 Milano
 tel. 02.89.12.48.38 • fax 02.89.12.49.70
 www.maximedical.it • maximedical@bec.it